



Three Awards. One Incredible Laser.



MiXto 

Learn how easy it is to achieve award-winning results for your patients with the MiXto Fractional CO₂ Laser.

The MiXto Fractional CO₂ Laser delivers winning results to capture the *Best Non-Surgical Facial Rejuvenation Enhancement Award** three years in a row.

MiXto leads the way in micro fractional CO₂ laser skin resurfacing for all skin types, easily outperforming all other energy-based systems – lasers, RF, and other heat producing devices. This award-winning technology combines the CO₂, gold standard for skin resurfacing with a unique patented scanner to deliver a precise matrix of Microspots that penetrate to the dermis and stimulate new collagen growth.

You'll see more results after one MiXto treatment than competing devices can deliver in three treatments. Patients can expect less discomfort and faster recovery times.

*The Aesthetic Show, Las Vegas, Nevada




Fractionele **MiXto** laserbehandeling mogelijk in deze praktijk



Pigmentvlekken
Huidverjonging
Acne littekens
Huidstriemen
Rimpels

De fractionele *MiXto* laser behandeling:

De fractionele methode zorgt ervoor dat de energie van de CO2 laser d.m.v. een zeer fijne laserstraal haarfijne gangen maakt en dit in de vorm van een raster. Deze hoogtechnologische techniek zorgt ervoor dat de ruimte tussen de gangen geen thermische schade ondervindt. Hierdoor kunnen we spreken van een korte herstelperiode. Het binnendringen tot diep in de dermis zorgt ervoor dat de aanmaak van nieuw collageen wordt gestimuleerd.

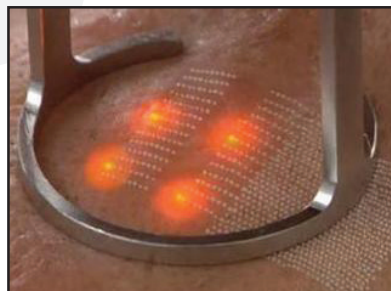

Opvallende effecten:

- ✓ De huid wordt strakker
- ✓ Poriën verkleinen
- ✓ Pigmentvlekken verdwijnen
- ✓ Fijne rimpels en acné littekens vervagen

Na de behandeling

Dag 1-2

De patiënt ondervindt na de behandeling een branderig gevoel dat 30 minuten tot 3 uur kan aanhouden, een neutrale hydraterende lotion zal dit ongemak verlichten. Naargelang de intensiteit van de behandeling kan er buiten de roodheid ook een tijdelijke zwelling optreden.

Dag 3-4

De roodheid van de huid evolueert geleidelijk aan naar een bruine teint. In deze fase wordt aangeraden het afvellen van de korstjes niet te bespoedigen door te krabben of te wrijven.

Dag 5-6

Tijdens het wassen vervelt de huid. De vernieuwde huid met een frisse kleur en verbeterde textuur wordt nu zichtbaar.

Vermijd langdurig onbeschermd contact met de zon gedurende 3 maanden. Gebruik dagelijks een vochtinbrengende sunblock crème.

Gedurende de 6 maanden die volgen na de behandeling zie je littekens, striemen en rimpels vervagen dankzij de aanmaak van nieuw collageen.

Waarom kiezen voor een *MiXto* behandeling?

- ✓ Snel herstel
- ✓ Veilig en doeltreffend
- ✓ Kortdurende procedure
- ✓ Geen anesthesie vereist
- ✓ Behandeling delicate plaatsen mogelijk